

全国自治体、企業、健保組合、病院、看護学校、大学等で行う、健康・福祉に関する取組みのお手伝いをさせていただいております。個人の方もご購入いただけます。お見積りをご希望の方は、「注文・見積 申込用紙」からご依頼いただけます。

商品検索

すべてのカテゴリー ▾



マイページ



カートを見る



検索

トップ > 歯科・口腔ケア > 口腔トレーニング > 咀嚼力判定ガム

咀嚼力判定ガム

品番：03-00231

価格

140 円 (税込)

数量

1

▼下記商品リストからご希望の商品をお選びください。

品名

	選択
咀嚼力判定ガム (50枚入り/箱)	<input type="radio"/>

“噛む力”を目でチェック！

- 咀嚼力をガムの色の変化で判定する新発想のガムです。
- 噛むことは口腔の健康だけではなく、脳の機能を活性化することや、身体のバランス状態(重心動揺)を保つ働きがあることもわかってきています。
- 子どもから高齢者まで「噛む大切さ」、「噛む効果」を啓発にお役立てください。

品番	入数	価格(税別)
03-00231	50枚入り /箱	130円/枚 6,500円/箱

※50枚入り/箱 単位での販売

※食料品につき、消費税率8%

【製品の特徴】

- 緑色のガムがよく噛むことで徐々に赤色に変化していきます。
- 小児から高齢者まで、簡単に使用することができますが誤嚥・誤飲にご注意ください。
- キシリトールを50%以上配合したシュガーレスガムで、味はミックスフルーツ味です。
- 歯に付着しにくいガムベースを使用しているため、



義歯を使用されてる方にも安心してご使用できます。
(ただし、全ての方の義歯に付着しないわけではありません。)

- アレルギー物質28品目不使用。

【使用方法】

- ガムを60回咀嚼して下さい。(1秒に1回のペース)
- 未就学児のように1袋量だと大きすぎる場合は1袋の1/3量を60回咀嚼してください。

【咀嚼後の色判定】

以下の3つの方法で判定できます

- ①製品のパッケージのカラーチャート
- ②10段階で評価するためのカラースケール
- ③Webアプリケーション

Webアプリケーション

Webアプリケーションでも判定することができます。

商品に同封されている測定用台紙の二次元コードを読み込むと

Webアプリケーションが起動します。

噛んだ後のガムを測定用台紙に乗せてスマートフォンやタブレットのカメラで撮影することで判定してください。

※賞味期限について

ガムは常温で保管された場合品質の変化がほとんどないので、賞味期限表示を省略させていただいております。

直射日光にさらされたり高温での保管は劣化する場合があるのでお買い求め後はお早めにご使用ください。

かごに入れる

最近チェックした商品

History



<消毒液>ヒビスコール
SH
1,496円 (税込)



骨ぬいぐるみキーホルダ
ー
308円 (税込)



咀嚼力判定ガム
140円 (税込)

ご利用ガイド

- >注文について
- >送料について
- >お支払いについて
- >返品・交換について
- >特定商取引法表示

お問い合わせ

>株式会社 保健福祉ネットワーク

〒110-0014 東京都台東区北上野2-28-2プリムラ・ハセビル
TEL. 03-5806-3553 FAX. 03-5806-3555
mail. info@hw-net.com
Web. hw-net.co.jp